

Lot de 50 masques jetables – qualité médical adulte



Référence :0100015A64

Descriptif :

Niveau de filtration bactérienne supérieure à BFE 95%

Masques de protection respiratoire à haute filtration à élastique.

Conformes à la norme Européenne EN 149 2001+A1 2009

Haut degré de respirabilité.- Filtration bactérienne (EFB) supérieure à 95% (Type I)

3 plis pour un espace de respiration idéal

Ajustable à la forme du visage.

Non stérile, à usage unique.

Taille unique.Couleur : bleu.

Conditionné en boîte distributrice de 50 unités.

Taille: 18x8cm

Attention à bien respecter les conseils qui suivent concernant le port du masque.

Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque:

Avant de mettre un masque chirurgical, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique Pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon

[Lien vers la fiche du produit](#)